

CNR Arbovirus		Titre : Manuel de prélèvement	
Code : PILOT-PR-002	V : 11	Date d'application : 05/09/2025«DATEAPPLI»	Page : 4 / 12

## RÉSUMÉ DES CONDITIONS PRE-ANALYTIQUES ET D'ENVOI

Avant tout prélèvement, assurez-vous du consentement du patient à (i) l'envoi de ses prélèvements au CNR Arbovirus (ii) l'utilisation des reliquats d'échantillons à des fins de recherche et (iii) l'utilisation des données qui lui sont associées au sens du RGPD.

Attention, le CNR arbovirus ne réalise plus la qualification des donneurs (organes, tissus, cellules) en première ligne. Le CNR ne réalise pas de sérologie pré-vaccinale, sauf exceptions (patients immunodéprimés par exemple, à convenir avec un biologiste) ; ni de dépistage Zika chez les femmes enceintes en première ligne, sauf exceptions (malformations fœtales, symptomatologie clinique...).

QUELS PRÉLÈVEMENTS DOIT-ON FAIRE ET ENVOYER ?			
Prélèvement	Tube	Volume demandé	Conditions de transport (délai préconisé)
<b>Envoi systématique (HORS GREFFES)</b>			
1. <b>Sérum</b>	Tube sec avec gel 8,5mL Centrifugé	<b>8mL</b> pour patients >5ans <b>5mL</b> pour patients <5ans	+4°C (48h)
2. <b>Sang total</b>	Tube EDTA 8,5mL <b>Non</b> centrifugé	<b>8mL</b> pour patients >5ans <b>5mL</b> pour patients <5ans	
3. <b>Écouvillon pharyngé</b>	Tubes de 5 mL ou 10 mL avec milieu de transport Inactivé ou non inactivé	<b>2mL</b> minimum	
4. <b>Urine</b>	Flacon stérile et étanche type ECBU	<b>2mL</b> minimum	
<b>Si syndrome neurologique (HORS GREFFES)</b>			
5. <b>LCS</b>	Tube hermétique 2mL	<b>1mL</b> minimum	+4°C (48h)
<b>Autre prélèvement</b> : +4°C sauf biopsies -20°C			
MODALITÉS PRATIQUES D'ENVOI			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Joindre systématiquement la <u>fiche de renseignement</u> (<a href="http://www.cnr-arbovirus.fr">www.cnr-arbovirus.fr</a>)</li> <li>✓ Coller sur le colis l'étiquette orange CNR (<a href="http://www.cnr-arbovirus.fr">www.cnr-arbovirus.fr</a>)</li> <li>✓ Triple emballage UN 3373 avec mention « MATIERE BIOLOGIQUE, CATEGORIE B »</li> <li>✓ Contacts : 04 13 73 21 81 ; <a href="mailto:cnr-arbovirus.u1207@inserm.fr">cnr-arbovirus.u1207@inserm.fr</a></li> <li>✓ Adresse : <b>CNR Arbovirus – Laboratoire 114</b> <b>IHU Méditerranée Infection</b> <b>19-21 bd Jean Moulin</b> <b>13005 Marseille</b></li> </ul>			
RÉSULTATS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dans le cadre de ses missions, le CNR réalisera toutes les analyses pertinentes au vu des renseignements fournis via la fiche de renseignement. Il ne suivra pas forcément les prescriptions reçues</li> <li>➤ Analyses réalisées gratuitement, pas de facturation</li> <li>➤ Résultats communiqués par <b>email sécurisé</b> sous 2 à 5 jours ouvrables</li> <li>➤ Le non-respect des conditions pré-analytiques rend les prélèvements non conformes.</li> </ul>			